

# Entretien des lunettes de protection utilisé chez un patient y compris cas possible/avéré COVID-19

(Version 6 mars 2020)

## Prérequis :

Le soignant prenant en charge cette procédure porte des équipements de protection individuelle adaptés.

## Entretien des lunettes de protection :

### Si lunettes de protection à usage unique :

Jeter après utilisation

### Si lunettes de protection à usage multiple :

#### - Après le soin :

Nettoyer-désinfecter ce dispositif médical (DM) avec un produit détergent-désinfectant\* (chiffonnette ou lingette).

Laisser sécher spontanément.

**Avant réutilisation : Respecter le temps de contact pour la virucidie indiquée par le fabricant.**

#### - Si présence de liquides biologiques :

- Immerger le DM dans une solution détergente-désinfectante\* (respecter la dilution et le temps d'immersion indiqués par le fabricant)

- Nettoyer avec une action mécanique.

- Rincer, sécher.

- Puis nettoyer-désinfecter ce DM avec un produit détergent-désinfectant\* (chiffonnette ou lingette).

Laisser sécher spontanément.

**Avant réutilisation : Respecter le temps de contact pour la virucidie indiquée par le fabricant.**

## Entretien des lunettes de protection en cas prise en charge d'un cas COVID-19 :

### Il est impératif :

- De respecter la procédure décrite ci-dessus
- De vérifier le temps de contact pour une virucidie indiquée par le fabricant.

En cas de non-respect du temps de contact pour obtenir la virucidie, renouveler la procédure.

\*Produit répondant à la norme de virucidie NF EN 14476